

ViscoFlux Протокол

НАБОР ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО УМЕНЬШЕНИЯ ВЯЗКОСТИ СПЕРМЫ

Набор **ViscoFlux** состоит из шприцев с луер-коннектором и игл 18G для механического уменьшения вязкости спермы.

ViscoFlux рекомендуется использовать до оценки подвижности сперматозоидов в вязких образцах, поскольку высокая вязкость спермы связана с нарушением подвижности сперматозоидов.

ViscoFlux может применяться до количественного определения концентрации сперматозоидов в вязких образцах без необходимости использования разбавителей.

Условия хранения:

Шприцы и иглы необходимо хранить при комнатной температуре и беречь от попадания пыли и других частиц окружающей среды.

Внимание:

Иглы – это острые предметы, при неправильном обращении с которыми можно нанести себе вред.

Процедура:

После разжижения спермы наберите ее в шприц с луер-коннектором и перенесите содержимое в контейнер. Вязкость семенной плазмы нарушается за счет ее прохождения через иглу 18G. Рекомендуется повторить процедуру два или три раза.

После такой обработки образец больше не является вязким и должен течь как вода, без повреждения самих сперматозоидов.



Эксклюзивный дистрибьютор ООО «БМТ»

117342, г. Москва, ул. Бутлерова, 17Б

+7 (495) 504-15-52, info@bmtltd.ru, www.bmtltd.ru